

Bedienungsanleitung

-Stufenrampen-

Für weitere Verwendung aufbewahren.





Gilt nur für Serienprodukte, nicht für Sonderanfertigungen

Edition 2024

© LMB GmbH & Co. KG
Schützenplatz 5A • D-28790 Schwanewede
Tel: +49 (0) 421 24 10 50
info@hebelifte.de • www.hebelifte.de

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Abbildungen sind schematisch und können in Ausführung und Detail vom gefertigten Produkt abweichen.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Art.-Nr. SR10V1 - SR290V5, SR10V1-100 - SR290V5-100, HSR10 - HSR230, ETSR30 - ETSR100, ETSR50-AO - ETSR190-AO, ZTSR-AU, ZTSR-AO, DTSR-AU, SONDERBAUSR

Produktbezeichnung

Die Rollstuhlrampen der LMB GmbH & Co. KG zum Befahren mit Rollstühlen und Gehhilfen dienen zum Ausgleich von Höhenunterschieden an Treppenstufen oder sonstigen Hindernissen. Je nach Ausführung bzw. Größe können eine oder mehrere Treppen bzw. Stufen oder Schwellen überbrückt werden. Die mobilen Rampen sind meist für einen dauerhaften Gebrauch ausgelegt und dementsprechend robust und witterungsbeständig. Der Rollstuhlfahrer kann je nach Gegebenheit Steigungen überwinden. Die Rollstuhlrampen sind für den Gebrauch im Freien geeignet.

Anwender

Die Rollstuhlrampen der LMB GmbH & Co. KG finden bei Personen Anwendung, die auf den Rollstuhl oder Gehhilfe angewiesen sind, sowie deren Begleitpersonen.

Probleme

Bei Problemen während der Inbetriebnahme oder bei bestimmten Fehlern wie z.B. Stufensituation und Rampe passen nicht zusammen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder den Kundendienst der LMB GmbH & Co. KG.

Indikationen

Beeinträchtigung der alltagsrelevanten Mobilität, bei gegebener Versorgung mit einem Rollstuhl oder einer Gehhilfe, durch z.B. Stufen und Schwellen.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Vorkommnismeldung

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind Ihrer zuständigen Landesbehörde und der LMB GmbH & Co. KG und zu melden.

Beschädigung der Verpackung

Nach Erhalt der Rollstuhlrampe prüfen Sie umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit. Ist das Produkt beschädigt, verständigen Sie unverzüglich Ihren Fachhändler und nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

Erklärung der Symbole des Produktlabels

Symbol	Bedeutung
	Seriennummer
	Artikelnummer
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten

Transport-und Lagerungshinweise

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der Weitertransport in der von der LMB GmbH & Co. KG gelieferten Verpackung erfolgen. Die Rampen sollten an einem sauberen und trockenem Ort gelagert werden.

Zubehör

Es dürfen nur Originalkomponenten der LMB GmbH & Co. KG verwendet werden.

Änderungen am Produkt

Veränderungen jeglicher Art am Produkt und/oder seinen Einzelkomponenten sind nicht gestattet.

Technische Daten SR

Gesamtlänge in cm	10 - 300
Länge in cm	10 - 290
Breite in cm	80 - 100
Höhe in cm	max. 2 - 58
Gewicht in kg	SR10V1 - 1,15 ; SR10V2 - 1,15 ; SR10V3 - 1,15 ; SR10V4 - 1,15 ; SR10V5 - 1,15 ; SR20V1 - 2,3 ; SR20V2 - 2,3 ; SR20V3 - 2,3 ; SR20V4 - 2,3 ; SR20V5 - 2,3 ; SR30V1 - 3,45 ; SR30V2 - 3,45 ; SR30V3 - 3,45 ; SR30V4 - 3,45 ; SR30V5 - 3,45 ; SR40V1 - 4,6 ; SR40V2 - 4,6 ; SR40V3 - 4,6 ; SR40V4 - 4,6 ; SR40V5 - 4,6 ; SR50V1 - 5,75 ; SR50V2 - 5,75 ; SR50V3 - 5,75 ; SR50V4 - 5,75 ; SR50V5 - 5,75 ; SR60V1 - 6,9 ; SR60V2 - 6,9 ; SR60V3 - 6,9 ; SR60V4 - 6,9 ; SR60V5 - 6,9 ; SR70V1 - 8,05 ; SR70V2 - 8,05 ; SR70V3 - 8,05 ; SR70V4 - 8,05 ; SR70V5 - 8,05 ; SR80V1 - 9,2 ; SR80V2 - 9,2 ; SR80V3 - 9,2 ; SR80V4 - 9,2 ; SR80V5 - 9,2 ; SR90V1 - 10,35 ; SR90V2 - 10,35 ; SR90V3 - 10,35 ; SR90V4 - 10,35 ; SR90V5 - 10,35 ; SR100V1 - 11,5 ; SR100V2 - 11,5 ; SR100V3 - 11,5 ; SR100V4 - 11,5 ; SR100V5 - 11,5 ; SR110V1 - 12,65 ; SR110V2 - 12,65 ; SR110V3 - 12,65 ; SR110V4 - 12,65 ; SR110V5 - 12,65 ; SR120V1 - 13,8 ; SR120V2 - 13,8 ; SR120V3 - 13,8 ; SR120V4 - 13,8 ; SR120V5 - 13,8 ; SR130V1 - 14,95 ; SR130V2 - 14,95 ; SR130V3 - 14,95 ; SR130V4 - 14,95 ; SR130V5 - 14,95 ; SR140V1 - 16,1 ; SR140V2 - 16,1 ; SR140V3 - 16,1 ; SR140V4 - 16,1 ; SR140V5 - 16,1 ; SR150V1 - 17,25 ; SR150V2 - 17,25 ; SR150V3 - 17,25 ; SR150V4 - 17,25 ; SR150V5 - 17,25 ; SR160V1 - 18,4 ; SR160V2 - 18,4 ; SR160V3 - 18,4 ; SR160V4 - 18,4 ; SR160V5 - 18,4 ; SR170V1 - 19,55 ; SR170V2 - 19,55 ; SR170V3 - 19,55 ; SR170V4 - 19,55 ; SR170V5 - 19,55 ; SR180V1 - 20,7 ; SR180V2 - 20,7 ; SR180V3 - 20,7 ; SR180V4 - 20,7 ; SR180V5 - 20,7 ; SR190V1 - 21,85 ; SR190V2 - 21,85 ; SR190V3 - 21,85 ; SR190V4 - 21,85 ; SR190V5 - 21,85 ; SR200V1 - 23 ; SR200V2 - 23 ; SR200V3 - 23 ; SR200V4 - 23 ; SR200V5 - 23 ; SR210V1 - 24,15 ; SR210V2 - 24,15 ; SR210V3 - 24,15 ; SR210V4 - 24,15 ; SR210V5 - 24,15 ; SR220V1 - 25,3 ; SR220V2 - 25,3 ; SR220V3 - 25,3 ; SR220V4 - 25,3 ; SR220V5 - 25,3 ; SR230V1 - 26,45 ; SR230V2 - 26,45 ; SR230V3 - 26,45 ; SR230V4 - 26,45 ; SR230V5 - 26,45 ; SR240V1 - 27,6 ; SR240V2 - 27,6 ; SR240V3 - 27,6 ; SR240V4 - 27,6 ; SR240V5 - 27,6 ; SR250V1 - 28,75 ; SR250V2 - 28,75 ; SR250V3 - 28,75 ; SR250V4 - 28,75 ; SR250V5 - 28,75 ; SR260V1 - 29,9 ; SR260V2 - 29,9 ; SR260V3 - 29,9 ; SR260V4 - 29,9 ; SR260V5 - 29,9 ; SR270V1 - 31,05 ; SR270V2 - 31,05 ; SR270V3 - 31,05 ; SR270V4 - 31,05 ; SR270V5 - 31,05 ; SR280V1 - 32,2 ; SR280V2 - 32,2 ; SR280V3 - 32,2 ; SR280V4 - 32,2 ; SR280V5 - 32,2 ;

Gewicht in KG	SR290V1 - 33,35 ; SR290V2 - 33,35 ; SR290V3 - 33,35 ; SR290V4 - 33,35 ; SR290V5 - 33,35 ; SR10V1-100 - 1,45 ; SR10V2-100 - 1,45 ; SR10V3-100 - 1,45 ; SR10V4-100 - 1,45 ; SR10V5-100 - 1,45 ; SR20V1-100 - 2,9 ; SR20V2-100 - 2,9 ; SR20V3-100 - 2,9 ; SR20V4-100 - 2,9 ; SR20V5-100 - 2,9 ; SR30V1-100 - 4,35 ; SR30V2-100 - 4,35 ; SR30V3-100 - 4,35 ; SR30V4-100 - 4,35 ; SR30V5-100 - 4,35 ; SR40V1-100 - 5,8 ; SR40V2-100 - 5,8 ; SR40V3-100 - 5,8 ; SR40V4-100 - 5,8 ; SR40V5-100 - 5,8 ; SR50V1-100 - 7,25 ; SR50V2-100 - 7,25 ; SR50V3-100 - 7,25 ; SR50V4-100 - 7,25 ; SR50V5-100 - 7,25 ; SR60V1-100 - 8,7 ; SR60V2-100 - 8,7 ; SR60V3-100 - 8,7 ; SR60V4-100 - 8,7 ; SR60V5-100 - 8,7 ; SR70V1-100 - 10,15 ; SR70V2-100 - 10,15 ; SR70V3-100 - 10,15 ; SR70V4-100 - 10,15 ; SR70V5-100 - 10,15 ; SR80V1-100 - 11,6 ; SR80V2-100 - 11,6 ; SR80V3-100 - 11,6 ; SR80V4-100 - 11,6 ; SR80V5-100 - 11,6 ; SR90V1-100 - 13,05 ; SR90V2-100 - 13,05 ; SR90V3-100 - 13,05 ; SR90V4-100 - 13,05 ; SR90V5-100 - 13,05 ; SR100V1-100 - 14,5 ; SR100V2-100 - 14,5 ; SR100V3-100 - 14,5 ; SR100V4-100 - 14,5 ; SR100V5-100 - 14,5 ; SR110V1-100 - 15,95 ; SR110V2-100 - 15,95 ; SR110V3-100 - 15,95 ; SR110V4-100 - 15,95 ; SR110V5-100 - 15,95 ; SR120V1-100 - 17,4 ; SR120V2-100 - 17,4 ; SR120V3-100 - 17,4 ; SR120V4-100 - 17,4 ; SR120V5-100 - 17,4 ; SR130V1-100 - 18,85 ; SR130V2-100 - 18,85 ; SR130V3-100 - 18,85 ; SR130V4-100 - 18,85 ; SR130V5-100 - 18,85 ; SR140V1-100 - 20,3 ; SR140V2-100 - 20,3 ; SR140V3-100 - 20,3 ; SR140V4-100 - 20,3 ; SR140V5-100 - 20,3 ; SR150V1-100 - 21,75 ; SR150V2-100 - 21,75 ; SR150V3-100 - 21,75 ; SR150V4-100 - 21,75 ; SR150V5-100 - 21,75 ; SR160V1-100 - 23,2 ; SR160V2-100 - 23,2 ; SR160V3-100 - 23,2 ; SR160V4-100 - 23,2 ; SR160V5-100 - 23,2 ; SR170V1-100 - 24,65 ; SR170V2-100 - 24,65 ; SR170V3-100 - 24,65 ; SR170V4-100 - 24,65 ; SR170V5-100 - 24,65 ; SR180V1-100 - 26,1 ; SR180V2-100 - 26,1 ; SR180V3-100 - 26,1 ; SR180V4-100 - 26,1 ; SR180V5-100 - 26,1 ; SR190V1-100 - 27,55 ; SR190V2-100 - 27,55 ; SR190V3-100 - 27,55 ; SR190V4-100 - 27,55 ; SR190V5-100 - 27,55 ; SR200V1-100 - 29 ; SR200V2-100 - 29 ; SR200V3-100 - 29 ; SR200V4-100 - 29 ; SR200V5-100 - 29 ; SR210V1-100 - 30,45 ; SR210V2-100 - 30,45 ; SR210V3-100 - 30,45 ; SR210V4-100 - 30,45 ; SR210V5-100 - 30,45 ; SR220V1-100 - 31,9 ; SR220V2-100 - 31,9 ; SR220V3-100 - 31,9 ; SR220V4-100 - 31,9 ; SR220V5-100 - 31,9 ; SR230V1-100 - 33,35 ; SR230V2-100 - 33,35 ; SR230V3-100 - 33,35 ; SR230V4-100 - 33,35 ; SR230V5-100 - 33,35 ; SR240V1-100 - 34,8 ; SR240V2-100 - 34,8 ; SR240V3-100 - 34,8 ; SR240V4-100 - 34,8 ; SR240V5-100 - 34,8 ; SR250V1-100 - 36,25 ; SR250V2-100 - 36,25 ; SR250V3-100 - 36,25 ; SR250V4-100 - 36,25 ; SR250V5-100 - 36,25 ; SR260V1-100 - 37,7 ; SR260V2-100 - 37,7 ; SR260V3-100 - 37,7 ; SR260V4-100 - 37,7 ; SR260V5-100 - 37,7 ; SR270V1-100 - 39,15 ; SR270V2-100 - 39,15 ; SR270V3-100 - 39,15 ; SR270V4-100 - 39,15 ; SR270V5-100 - 39,15 ; SR280V1-100 - 40,6 ; SR280V2-100 - 40,6 ; SR280V3-100 - 40,6 ; SR280V4-100 - 40,6 ; SR280V5-100 - 40,6 ; SR290V1-100 - 42,05 ; SR290V2-100 - 42,05 ; SR290V3-100 - 42,05 ; SR290V4-100 - 42,05 ; SR290V5-100 - 42,05 ;
---------------	---

Max. Belastung in kg	250
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten HSR

Gesamtlänge in cm	20 - 240
Länge in cm	10 - 230
Breite in cm	80
Höhe in cm	max. 2 - 46
Gewicht in kg	HSR20 - 3,5; HSR30 - 4,5; HSR40 - 5,5; HSR50 - 6,5; HSR60 - 7,5; HSR70 - 8; HSR80 - 10; HSR90 - 11; HSR100 - 12; HSR110 - 13; HSR120 - 14; HSR130 - 15; HSR140 - 16 ; HSR150 - 17,5 ; HSR160 - 18,5; HSR170 - 19,5; HSR180 - 20,5; HSR190 - 21,5; HSR200 - 22,5; HSR 210 - 23,5; HSR220 - 24,5; HSR230 - 25
Max. Belastung in kg	250
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten ZTSR

Gesamtlänge in cm	Sonderbau
Länge in cm	Sonderbau
Breite in cm	Sonderbau
Höhe in cm	Sonderbau
Gewicht in kg	Sonderbau
Max. Belastung in kg	250
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten DTSR

Gesamtlänge in cm	Sonderbau
Länge in cm	Sonderbau
Breite in cm	Sonderbau
Höhe in cm	Sonderbau
Gewicht in kg	Sonderbau
Max. Belastung in kg	250
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten ETSR

Gesamtlänge in cm	30 - 100
Länge in cm	30 - 100
Breite in cm	80
Höhe in cm	max. 9
Gewicht in kg	ETSR30 - 3,4; ETSR40 - 4,6; ETSR50 - 5,8; ETSR60 - 6,9; ETSR70 - 8; ETSR80 - 9; ETSR90 - 10,1; ETSR100 - 11,2
Max. Belastung in kg	120
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten ETSR-AO

Gesamtlänge in cm	50 - 190
Länge in cm	50 - 190
Breite in cm	80
Höhe in cm	Sonderbau
Gewicht in kg	ETSR50-AO - 5,2; ETSR60-AO - 6,2; ETSR70-AO - 7,2; ETSR80-AO - 8,3; ETSR90-AO - 9,3; ETSR100-AO - 10,3; ETSR110-AO - 11,4; ETSR120-AO - 12,4; ETSR130-AO - 13,4; ETSR140-AO - 14,5; ETSR150- AO - 15,5; ETSR160-AO - 16,5; ETSR170-AO - 17,6; ETSR180-AO - 18,6; ETSR190-AO - 19,6
Max. Belastung in kg	250
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Technische Daten Sonderbau

Gesamtlänge in cm	Sonderbau
Länge in cm	Sonderbau
Breite in cm	Sonderbau
Höhe in cm	Sonderbau
Gewicht in kg	Sonderbau
Max. Belastung in kg	Sonderbau
Material	Aluminium
Lebensdauer	10 Jahre

Wiederverwendbarkeit

Das Produkt ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Bevor dieses an einen anderen Nutzer weitergegeben wird, ist es durch einen Fachhändler zu warten. Bei der Weitergabe muss die Bedienungsanleitung dem neuen Nutzer übergeben werden.

Entsorgungshinweise


Nach dem Überschreiten der Lebensdauer informieren Sie sich bitte über die korrekte Entsorgung des Produktes bei den örtlichen Landesbehörden, Ihrem Fachhändler oder der LMB GmbH & Co. KG.

Bestimmungsgemäße Verwendung.

Die Rampe darf nur mit Rollstühlen, Elektromobilen, Personen mit Rollator und deren Begleiter befahren/betreten werden. Alle anderen Verwendungszwecke sind ausgeschlossen. Die Rampe darf nur mit Hilfe einer Begleitperson befahren/betreten werden. Diese Person darf keine körperlichen Einschränkungen haben. Bei Frostgefahr (Außentemperaturen kleiner ca. 4°C) muss die Rampe von Schnee, Eis und Glätte befreit werden.

Aufbau der Stufenrampen

- Legen Sie die Rampe auf den Boden bzw. auf die Stufe. Achten Sie darauf, dass die Rampe kippsicher aufliegt.
- Bei Rampen, die mit einer Auflagefläche versehen sind, muss diese vollflächig auf der Stufe aufliegen.
- Um ein Verkratzen des Untergrundes (z.B. bei Parkett oder Laminat) zu vermeiden, muss eine geeignete Unterlage (z.B. eine Antirutschmatte) unter die Rampe gelegt werden.
- Wenn Stützen vorhanden sind, diese immer Vertikal zum Boden montieren.

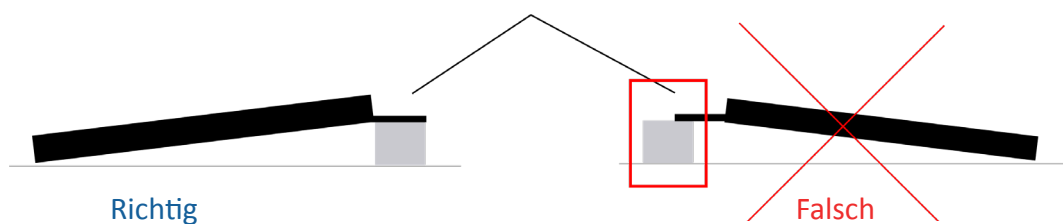

Sicherheitshinweise

- Tragen Sie in jedem Fall festes, rutschesicheres Schuhwerk.
- Beachten Sie, dass sich bei Nässe die Rutschhemmung der Rampenoberfläche verringert. Es besteht Rutschgefahr. Befahren bzw. betreten Sie die Rampe daher mit entsprechender Vorsicht.
- Rollstuhlfahrer müssen bei der Benutzung der Rampe einen Sicherheitsgurt anlegen.
- Winterbetrieb siehe „Bestimmungsgemäße Verwendung“
- Rollstühle, die von einer Begleitperson geschoben werden, müssen mit einer Zusatzbremse, die die Begleitperson bedienen kann, ausgerüstet sein.
- Beachten Sie die maximale Belastung. Diese Angabe befindet auf einem Aufkleber an der Rampe.

Wartung und Pflege

- Überprüfen Sie vor jeder Anwendung die Rampe auf Risse oder Ausbeulungen. Sollten Sie eine Beschädigung feststellen, darf die Rampe nicht benutzt werden. Wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Die Laufläche der Rampe muss vor jeder Benutzung von Verschmutzungen durch z.B. Laub oder Sand befreit werden.
- Eine Reinigung kann mit Hilfe von Wasser und einem handelsüblichen Haushaltsreinger erfolgen. Benutzen Sie keine harten Bürsten oder andere harte Gegenstände wie z.B. Stahlwolle. Dies würde die Oberfläche zerstören.
- Die Rampe darf nicht mit Salz gestreut werden, da dies die Oberfläche schädigt.

Für Menschen mit Sehbehinderung ist dieses Dokument als PDF-Datei auf unserer Internetseite www.hebelifte.de zugänglich.

Ihr Fachhändler