


Bedienungsanleitung

-Teleskoprampen-

Für weitere Verwendung aufbewahren.

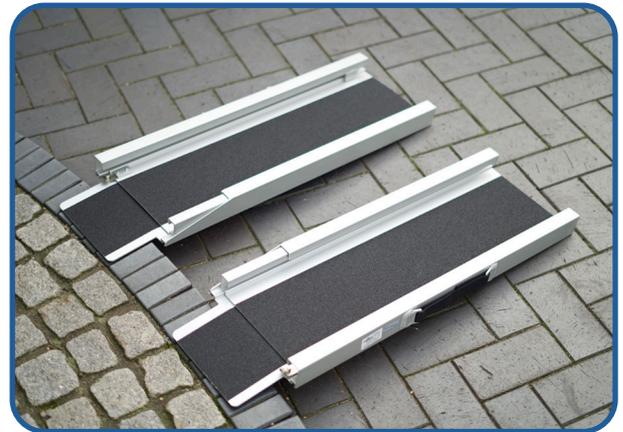



Edition 01/2024

© LMB GmbH & Co. KG
Schützenplatz 5A • D-28790 Schwanewede
Tel: +49 (0) 421 24 10 50 • Fax: +49 (0) 421 24 10 515
info@hebelifte.de • www.hebelifte.de

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten. Abbildungen sind schematisch und können in Ausführung und Detail vom gefertigten Produkt abweichen.

Diese Bedienungsanleitung gilt für Art.-Nr. TR130, TR195, TR290, TR310

Zweckbestimmung

Die Rollstuhlrampen der LMB GmbH & Co. KG dienen zum Ausgleich von Höhenunterschieden an Treppenstufen oder sonstigen Hindernissen. Je nach Ausführung bzw. Größe können eine oder mehrere Treppen bzw. Stufen oder Schwellen überbrückt werden. Die mobilen Rampen sind meist für einen dauerhaften Gebrauch ausgelegt und dementsprechend robust und witterungsbeständig. Der Rollstuhlfahrer kann je nach Gegebenheit Steigungen überwinden. Die Rollstuhlrampen sind für den Gebrauch im Freien geeignet. Die Rutschbeschichtung auf der Lauffläche ist durch einen Antirutschbelag gegeben.

Die Rampe darf nur mit Rollstühlen, Elektromobilen, Personen mit Rollator und deren Begleiter befahren/betreten werden. Alle anderen Verwendungszwecke sind ausgeschlossen. Die Rampe darf nur mit Hilfe einer Begleitperson befahren/betreten werden. Diese Person darf keine körperlichen Einschränkungen haben.

Anwender

Die Rollstuhlrampen der LMB GmbH & Co. KG finden bei Personen Anwendung, die auf den Rollstuhl oder Gehhilfe angewiesen sind, sowie deren Begleitpersonen.

Probleme

Bei Problemen während der Inbetriebnahme oder bei bestimmten Fehlern wie z.B. Stufensituation und Rampe passen nicht zusammen, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler oder den Kundendienst der LMB GmbH & Co. KG.

Indikationen

Beeinträchtigung der alltagsrelevanten Mobilität, bei gegebener Versorgung mit einem Rollstuhl oder einer Gehhilfe, durch z.B. Stufen und Schwellen.

Kontraindikationen

Keine bekannt.

Vorkommismeldung

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind der LMB GmbH & Co. KG und Ihrer zuständigen Landesbehörde zu melden.

Beschädigung der Verpackung

Nach Erhalt der Rollstuhlrampe prüfen Sie umgehend den Inhalt auf Vollständigkeit. Ist das Produkt beschädigt, verständigen Sie unverzüglich Ihren Fachhändler und nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.

Erklärung der Symbole des Produktlabels

Symbol	Bedeutung
	Seriennummer
	Artikelnummer
	Hersteller
	Produktionsdatum
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten

Transport-und Lagerungshinweise

Um Beschädigungen zu vermeiden, sollte der Weitertransport in der von der LMB GmbH & Co. KG gelieferten Verpackung erfolgen. Die Rampen sollten an einem sauberen und trockenem Ort gelagert werden.

Zubehör

Es dürfen nur Originalkomponenten der LMB GmbH & Co, KG verwendet werden.

Änderungen am Produkt

Veränderungen jeglicher Art am Produkt und/oder seinen Einzelkomponenten sind nicht gestattet.

Technische Daten

Art. Nr.	TR130	TR195	TR290	TR310
Länge in cm	80 - 130	110 - 198	113 - 287	170 - 317
Spurbreite in cm	19	19	18	19
Gesamtbreite in cm	25	25	26	25
Höhe in cm	27,6	39,6	57,4	63,4
Gewicht in kg pro Paar	9	14	23	22
Max. Belastung in kg pro Paar	250	250	200	200
Auflagelänge in cm	10			
Überfahrerschutz in cm	4			
Steigung in %	20			
Material	Aluminium / Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial			
Lebensdauer	10 Jahre			

Wiederverwendbarkeit

Das Produkt ist für einen Wiedereinsatz geeignet. Bevor dieses an einen anderen Nutzer weitergegeben wird, ist eine Reinigung, Desinfektion und Freigabe durch den Fachhändler durchzuführen. Bei der Weitergabe muss die Bedienungsanleitung dem neuen Nutzer übergeben werden.

Entsorgungshinweise


Nach dem Überschreiten der Lebensdauer informieren Sie sich bitte über die korrekte Entsorgung des Produktes bei den örtlichen Landesbehörden, Ihrem Fachhändler oder der LMB GmbH & Co. KG.

Wartung

Keine Wartung erforderlich.

Montage der Teleskoprampen

- Legen Sie die Rampen flach auf den Boden.
- Bei Zweiteiligen Rampen: Lösen Sie den Arretierclip an der Lasche und ziehen Sie die beiden Rampenteile auseinander.
- Bei Dreiteiligen Rampen: Lösen Sie die Verriegelung des Arretiersplints und entfernen Sie den Splint vollständig.
- Ziehen Sie die Rampen auseinander und legen Sie sie auf die Stufe auf.
- Achten Sie darauf, dass die gummierte Auflage komplett auf der Stufe auf liegt.
- Positionieren Sie die Rampen parallel zueinander, entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder, wobei die Räder in der Mitte der jeweiligen Rampe laufen müssen.

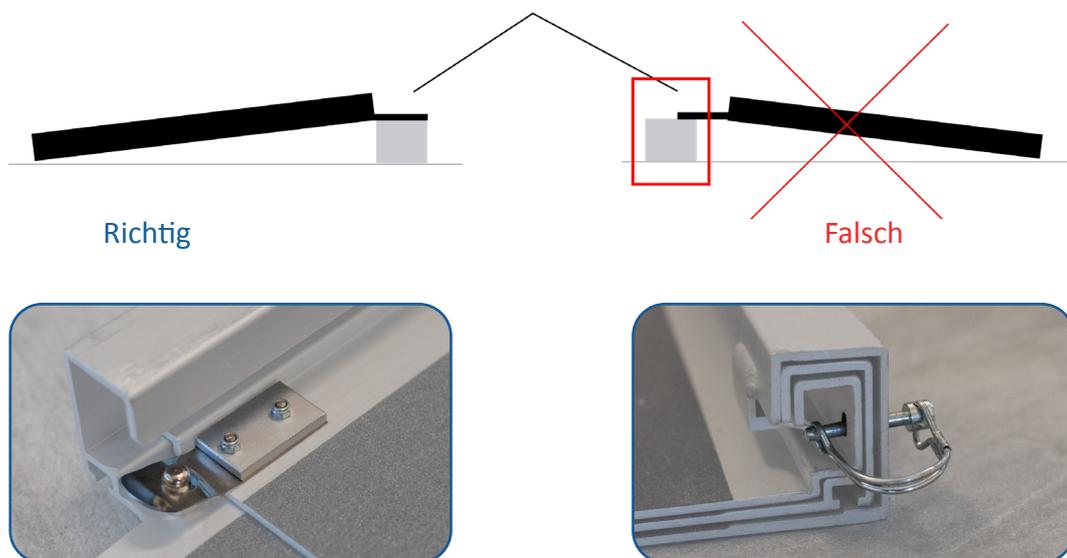

Demontage der Rampe

- Schieben Sie die Rampe so zusammen, bis sich die Bohrungen im Seitenteil decken. Setzen Sie den Clip ein und schließen Sie die Verriegelung.

Sicherheitshinweise

- **ACHTUNG:** Wenn die Arretierung gelöst ist, rutschen die Rampen sehr leicht auseinander. Um ein unkontrolliertes Auseinanderrutschen zu vermeiden, achten Sie also unbedingt darauf, dass die Rampen fest auf dem Boden stehen!
- Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob die beiden Rampen parallel zueinander liegen und der Abstand entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder eingestellt ist.
- Tragen Sie in jedem Fall festes, rutschesicheres Schuhwerk.
- Beachten Sie, dass sich bei Nässe die Rutschhemmung der Rampen oberfläche verringert. Es besteht Rutschgefahr. Befahren bzw. betreten Sie die Rampe daher mit entsprechender Vorsicht.
- Rollstuhlfahrer müssen bei der Benutzung der Rampe einen Sicherheitsgurt anlegen.
- Rollstühle, die von einer Begleitperson geschoben werden, müssen mit einer Zusatzbremse, die die Begleitperson bedienen kann, ausgerüstet sein.
- Beachten Sie die maximale Belastung. Diese Angabe befindet auf einem Aufkleber an der Rampe.
- Bei Frostgefahr (Außentemperaturen kleiner ca. 4°C) muss die Rampe von Schnee, Eis und Glätte befreit werden.

Reinigung und Desinfektion

- Die Lauffläche der Rampe muss vor jeder Benutzung von Verschmutzungen durch z.B. Laub oder Sand befreit werden.
- Eine Reinigung kann mit Hilfe von Wasser und einem handelsüblichen Haushaltsreinger erfolgen. Benutzen Sie keine harten Bürsten oder andere harte Gegenstände wie z.B. Stahlwolle. Dies würde die Oberfläche zerstören.
- Die Rampe darf nicht mit Salz gestreut werden, da dies die Oberfläche schädigt.
- Für die Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel für Oberflächen. Anwendung: Gereinigte, feucht abgewischte Rampe vollständig mit dem Desinfektionsmittel benetzen. Mindestes 30 Sekunden einwirken lassen. Vor der Verwendung vollständig trocknen lassen.
- Bei Abnutzung des Antirutschbelags ist dieser zu erneuern.

Für Menschen mit Sehbehinderung ist dieses Dokument als PDF-Datei auf unserer Internetseite www.hebelifte.de zugänglich.

Ihr Fachhändler